

 **QLICKSMART®**
SnapIT
Glasampullenöffner



Schütze Dich

Sichere Ampullenöffnung

▲ Schnittverletzungen beim Öffnen von Glasampullen - eine unterschätzte Gefahr

Jeder dritte Beschäftigte im Gesundheitswesen hat sich beim Öffnen von Glasampullen mit der Hand bereits geschnitten. Leider wurde dieses Risiko bisher von vielen Anwendern, aber auch von der Verwaltung in Kliniken und Krankenhäusern erheblich unterschätzt.

Durch Glasampullen verursachte Schnitte können jeden betreffen, egal wie erfahren Sie im Öffnen von Glasampullen sind. Selbst ein geringfügiger Schnitt kann Ihre medizinische Tätigkeit erheblich beeinträchtigen. Auch schwerere Verletzungen wie Sehnenrisse wurden berichtet.

Wiederholte Verletzungen von Mitarbeitern beim Öffnen der Ampullen brachte einen Krankenpfleger in Australien auf eine neue Idee und er erfand den zwischenzeitlich preisgekrönten Ampullenöffner Qlicksmart SnapIT.


▲ Der preisgekrönte Ampullenöffner



Qlicksmart SnapIT schützt den Anwender beim Öffnen von Ampullen vor Verletzungen an scharfen Kanten oder Glassplittern.



Der Ampullenöffner ist sehr praktisch in der Anwendung.

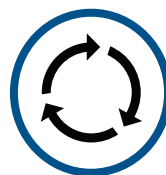


Der wiederverwendbare SnapIT bietet eine kosteneffiziente Lösung zum Öffnen von Glasampullen.



Der Ampullenöffner wurde mehrfach ausgezeichnet - ein klarer Beweis für praktische Handhabung und effizienten Schutz zur Reduzierung von Verletzungen an Glasampullen

Lite Edition

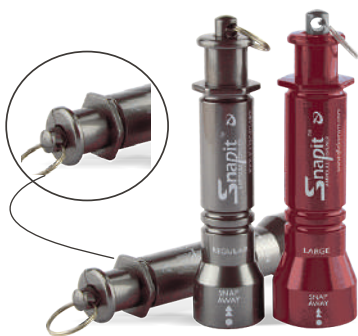

- SnapIT Lite lässt sich perfekt an einem Band oder einfach in der Tasche tragen und ist jederzeit einsatzbereit.
- Der Ampullenöffner besteht aus robustem hochwertigem Kunststoff.
- Der SnapIT Lite Ampullenöffner hat einen sechseckigen Rollschutzkragen und kann sicher auf einem Tisch oder Wagen abgelegt werden.

Personal Edition



- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium, zwei Farben zur Auswahl.
- Der Personal Edition lässt sich perfekt an einem Band oder einfach in der Tasche tragen und ist jederzeit einsatzbereit.
- Bei Bedarf autoklavierbar.

Trolley Edition



- Hergestellt aus hochwertigem Aluminium.
- Die Trolley Edition ist in drei Größen erhältlich (standard, groß und XL). Alle haben eine abgeflachte Seite, so dass der SnapIT Ampullenöffner auf der Arbeitsplatte nicht wegrollen kann.
- Bei Bedarf autoklavierbar.

Ausführung	Personal	Trolley			Lite	
Artikelnummer	SN-01R	TE-01R	TE-01L	TE-01XL	SN-02R	SN-02L
Grösse	Standard	Standard	Groß	Extra	Standard	Groß
Kompatible Ampullengrößen*	1-2 ml, 5-10 ml, 10-15 ml	1-2ml, 5-10 ml, 10-15 ml	5-10 ml, 10-15 ml, 20-25 ml	20-25 ml, 25-30 ml	1-2ml, 5-10ml, 10-15ml	5-10 ml, 10-15 ml, 20-25 ml
Masse (pro Einheit)	Länge: 80 mm Breite: 17 mm	Länge: 80 mm Breite: 25 mm	Länge: 80 mm Breite: 29 mm	Länge: 80 mm Breite: 25 mm	Länge: 80 mm Breite: 13 mm	Länge: 80 mm Breite: 18 mm
Gewicht (pro Einheit)	34 g	50 g	74 g	66 g	11 g	13 g
Farben	blau, lila	schwarz	rot	dunkelblau	grau, lila, pink, blau	burgunder
GMDN code	10098					
Material	Anodisiertes Aluminium (Körper), Silikon (O-Ring), Edelstahl (Schlüsselring und Feder).				Kunststoff (Körper), Silikon (O-Ring), Edelstahl (Schlüsselring und Feder).	
Latex	Nein					
DEHP	Nein					
Steril	Nein, kann bei 130° autoklaviert werden.				Nicht autoklavierbar.	
Mehrweg	Wiederverwendbar. O-Ring kann bei Verlust oder Verschleiss ausgetauscht werden.					
Zulassungen	USA FDA-Zulassung					

* Kompatibilität bedingt durch Form der Ampulle und Durchmesser des Ampullenkopfs. Ampullen gleicher Grösse können unterschiedliche Formen und Kopfdurchmesser haben. Die Angabe der Ampullengrösse in ml ist als Richtwert zu verstehen.

Hinweise zur Anwendung des SnapIT

SnapIT
Mehrweg | Ampullenöffner



1. Markierungspunkte übereinander ausrichten (falls vorhanden). Ampullenkopf vorsichtig komplett in den SnapIT einführen. Der Ampullenkopf rastet am Hals ein.




BITTE BEACHTEN: Wenn Sie die Punktmarkierungen bei Ihrem üblichen Vorgehen von Ihrem Körper wegdrehen, vergewissern Sie sich nach dem Drehen und vor dem Hebeln, dass die Punkte noch übereinander liegen.

2. SnapIT mit geringem Kraftaufwand von der Punktmarkierung weghebeln, um den Kopf abbrechen. Der Kopf sollte im SnapIT bleiben.



3. Genau über eine Box für scharfe und spitze Gegenstände halten und mit dem Daumen den Auswurfstab nach unten drücken, um den Ampullenkopf auszuwerfen.

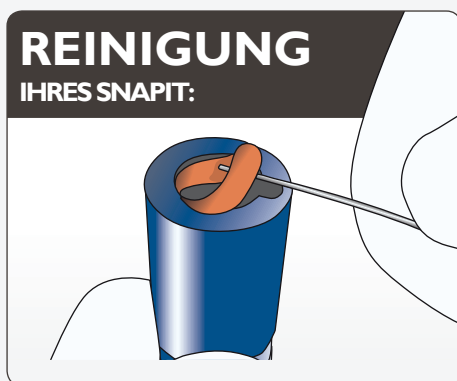

4. Reinigen Sie Ihren SnapIT regelmässig. O-Ring wie abgebildet entfernen, so dass der SnapIT zerlegt werden kann. Mit Wasser oder einem Krankenhausreiniger reinigen. Dabei alle Teile in eine saubere Schale legen, um nichts zu verlieren. Sorgfältig trocknen und wieder zusammensetzen

BITTE BEACHTEN: Sollte der Ampullenkopf zerbrechen, klopfen Sie den SnapIT über einer Box für scharfe und spitze Gegenstände aus, um zurückgebliebene Glassplitter zu entfernen und spülen Sie ihn vor der Demontage unter fließendem Wasser aus.


GRÖSSEN: Zu grosse Ampullen passen nicht in die Öffnung. Verwenden Sie in diesem Fall einen grösseren SnapIT. Bei zu kleinen Ampullen kann der SnapIT den Ampullenkopf nicht sicher fassen. Verwenden Sie in diesem Fall bitte einen kleineren SnapIT.




Erfahren Sie mehr ...

 www.rt-medical.de

 info@rt-medical.de

 05146 351 95 08

 05146 351 95 11

Qlicksmart Pty. Ltd.

 www.qlicksmart.com

 hello@qlicksmart.com